

## LactateScout

### テスト液

測定機能を確認するための専用液です。



#### 使用方法

- ① 機器のコードを正しく設定し、メニューを選択します。(下記表参照)
- ② ボトルを良く振ります、冷えている場合は人肌程度に温めます。
- ③ ノズルをキムワイブや清浄な布等で拭き、最初の1-2滴を捨てます。
- ④ 液を清浄なプラスチックやガラス等に出して測定します。

メニューと結果表示(機器のタイプにより異なります)

機器	使うメニュー	正常時表示
ラクテースカウト プラス	Dsc	OK
ラクテースカウト 4	機能テスト (10mmol/L) 	✓

#### 注意

- 複数回実施する場合は毎回新しい液滴で行ってください、1回の吸引で濃度が変わります。
- ボトルの口から直接の吸引は行わないでください、ボトル内の液濃度が変わります。
- エラーとなった場合は取扱説明書を参照ください。

